

Codosil™

ADHESIVE



Codosil™ ADHESIVE

adhezyjny opatrunek
silikonowy

terapia
bez bólu
rehabilitacja
blizn



TRICOMED

miękki
adhezyjny
nie brudzi
ubrań

Codosil™ ADHESIVE jest miękkim opatrunkiem warstwowym, stosowanym w rehabilitacji blizn i bliznowców.

Doskonale sprawdza się zarówno w przypadku przerośniętych, mało elastycznych blizn pooperacyjnych (blizny hipertroficzne i bliznowce) oraz w przypadku świeżych blizn pooperacyjnych, na przykład blizn po cesarskim cięciu. W ofercie są również specjalne kształty na blizny po operacjach piersi.

Codosil™ ADHESIVE wraz z wyrobami uciskowymi Codopress® i Codopress® PREMIUM stanowi kompletny system stosowany jako terapia uciskowa, która od lat wykorzystywana jest w skutecznej rehabilitacji rozległych blizn pooperacyjnych - zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Opatrunek powoduje spłaszczenie blizny, redukcję zaczerwienienia, a także zmniejsza uczucie swędzenia.

Zastosowanie

- w rehabilitacji blizn, w tym przerosłych blizn i bliznowców,
- profilaktycznie, u osób z tendencjami do tworzenia się przerosłych blizn i bliznowców,
- jako element uciskowej terapii rehabilitacji rozległych blizn pooperacyjnych wraz z ubrankiem Codopress® i Codopress® PREMIUM lub mocując za pomocą bandaża Codoban albo siatki opatrunkowej Codofix i Codofix PLUS.

- Codopress®
- Codofix
- Codopress® PREMIUM
- Codofix PLUS
- Codoban



JAK NALEŻY STOSOWAĆ Codosil™ ADHESIVE?

KSZTAŁTY I ROZMIARY Codosil™ ADHESIVE



1 Należy dopasować wyrób do kształtu blizny

Pamiętając o tym, że opatrunek powinien być o 1 cm większy niż rozmiar blizny.



2 Odkleić białą folię zabezpieczającą

Biała folia zabezpieczająca służy do ochrony warstwy adhezyjnej opatrunku.



3 Nakleić opatrunek na powierzchnię blizny

Właściwości adhezyjne opatrunku pozwalają na jego wielokrotne przyklejanie do powierzchni skóry. Przed każdym kolejnym zastosowaniem opatrunek musi być umyty.



elastyczna siatka Codofix®

4 Stabilizacja opatrunku przy pomocy siatki elastycznej Codofix®

Pomimo właściwości adhezyjnych zaleca się dodatkowe podtrzymanie opatrunku na ciele, na przykład za pomocą elastycznej siatki opatrunkowej. Szczególnie polecane jest to dla opatrunków zakładanych na ruchome części ciała. Siatka zabezpiecza opatrunek przed przypadkowym odklejeniem i ewentualnym zniszczeniem, wskutek tarcia. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci siatki wskazane jest również u osób o podwyższonej potliwości.

Siatka dostępna jest w różnych szerokościach, co umożliwi precyzyjne dobranie wyrobu do obwodu zabezpieczanej części ciała.




7x7



14x14



7x14

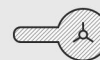

Breast 1



Breast 2

Opatrunek służy do rehabilitacji blizn,
co oznacza, że może być zastosowany
dopiero po całkowitym wygojeniu rany.

**Nie można stosować opatrunku przed
zdjęciem szwów chirurgicznych.**



JAK DBAĆ O BLIZNĘ I OPATRUNEK **Codosil™ ADHESIVE?**

TRICOMED

• **Miejsce stosowania opatrunku oraz sam opatrunek należy myć dwa razy dziennie**

w łagodnym roztworze mydła bez dodatku substancji nawilżających, np. kremów lub oliwek. Po umyciu wyrób należy opłukać w czystej, ciepłej wodzie.

• **Po umyciu pozostawić opatrunek w stanie rozłożonym do wyschnięcia**

Po wyschnięciu, sprawdzić właściwości adhezyjne opatrunku i jeśli są odpowiednie, ponownie założyć na bliźnię. Opatrunek używamy tak długo, dopóki nie pojawią się na nim uszkodzenia mechaniczne lub dopóki posiada on właściwości przylepne.

• **Opatrunek powinien pozostawać na bliźnie do 24 godzin na dobę**

z przerwami na jego czyszczenie. Czas użycia wyrobu powinien być stopniowany, tzn. w początkowym okresie stosowania opatrunek powinien być zakładany na bliźnię tylko na kilka godzin. Stopniowe wydłużanie czasu przyzwyczajają bliźnię do opatrunku i pozwala uniknąć ewentualnych reakcji nadwrażliwości skóry. Czas stopniowego kontaktu opatrunku z bliźnią powinien określić lekarz zalecający ten typ rehabilitacji.

Przykładowy schemat stopniowego użycia opatrunku wygląda następująco:

- pierwsze dwa dni nosimy opatrunek przez 2 godziny,
- kolejne dwa dni przez 4 godziny,
- przez kolejne dni zwiększamy o 2 godziny czas przebywania opatrunku na bliźnie, aż do uzyskania optymalnych 24 godzin.

• **W przypadku pojawienia się oznak nadwrażliwości takich jak:**

- wysypka
- swędzenie
- powierzchowna maceracja

W przypadku wystąpienia tego typu objawów należy przerwać okresowo stosowanie wyrobu, a następnie powrócić do stosowania terapii. Jeśli problem będzie się powtarzał należy zgłosić się do lekarza specjalisty.

Jeżeli oznaki nadwrażliwości pojawiają się po dłuższym okresie stosowania opatrunku, należy upewnić się, czy nie nastąpiła zmiana środka myjącego lub czy czynności higieniczne przebiegają tak samo jak dotychczas. Można też zredukować czas noszenia opatrunku do 12 godzin na dobę. Jeżeli objawy nadwrażliwości nie ustąpią, wówczas należy przerwać stosowanie opatrunku i skontaktować się z lekarzem.

• **Całkowity czas terapii**

jest sprawą indywidualną dla każdego pacjenta. Uzależniony jest od wielu czynników, między innymi związanych z bliźnią: rodzaj, wiek, umiejscowienie na ciele oraz związanych z terapią, czyli systematyczność i dzienny czas noszenia opatrunku przez pacjenta.

Opatrunek nie powinien być stosowany wspólnie z maściami, gdyż mogą one uszkodzić jego strukturę lub wywołać reakcje nadwrażliwości skóry.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ **Codosil™ ADHESIVE ?**

Poprawia wygląd blizny

- staje się jaśniejsza
- ulega spłaszczeniu
- jest bardziej elastyczna
- staje się mniej widoczna

Oferuje terapię bez bólu

- bez skalpela, lasera czy znieczulenia
- nie ingeruje mechanicznie ani chemicznie w bliznę
- nie sprawia bólu podczas użytkowania
- minimalizuje ryzyko powikłań

Docinanie opatrunku do rozmiarów blizny

- zwiększa wygodę pacjenta
- zmniejsza koszt leczenia – odcięta nieużyta część opatrunku może być wykorzystana w dalszym etapie leczenia

Adhezyjny

- ułatwia stabilne umieszczenie opatrunku na bliznie
- dla większej swobody ruchów i dłuższej żywotności opatrunku zaleca się jego dodatkowe zabezpieczenie np. za pomocą siatki Codofix®

Wielorazowego użytku

- codzienne mycie opatrunku odnawia jego właściwości użytkowe. Opatrunek można stosować do momentu wystąpienia utraty właściwości adhezyjnych lub uszkodzenia mechanicznego.

Dodatkowa warstwa

- zewnętrzna warstwa ochronna – podczas długotrwałej terapii zwiększa trwałość opatrunku, a tym samym obniża koszty leczenia.

Codosil™ ADHESIVE



Tricomed SA – ponad 50 lat tradycji

Tricomed SA to polska firma z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją w projektowaniu i produkcji wyrobów medycznych. Obecnie działa jako spółka akcyjna w ramach Grupy Kapitałowej TZMO SA.

Bogata oferta firmy obejmuje przede wszystkim implanty, opatrunki specjalistyczne oraz wyroby uciskowe do rehabilitacji blizn.

W 2009 roku Tricomed SA uzyskał status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Wytwarzane w firmie produkty posiadają znak bezpieczeństwa CE, a ich produkcja odbywa się zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 13485.



Można kupić na
matopat24.pl



TRICOMED SA
ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź
marketing@tricomed.com
tel. kom. 723 185 454
tel. (42) 684 78 21

TZMO SA
tzmo-global.com
tricomed.pl
matopat.pl
codopress.pl